


Quickguide til udlæsning af data

ZOLL AED Pro hjertestarter med infrarød port

Nødvendigt udstyr

PC med følgende programmer installeret:

- RescueNet Code Review (fra CD eller www.zolldata.com/rescuenet-code-review)
- Microsoft .Net Framework (fra Microsoft Update eller www.zolldata.com/c-r-downloads)
- USB port på computeren

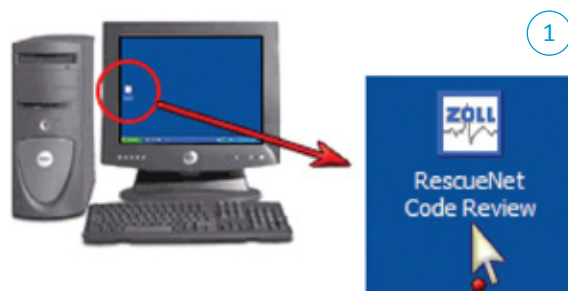

Vejledning

- 1) Åben programmet **RescueNet Code Review** på computeren. Programmet åbner en tom side.
- 2) **Åben batteridækslet** på AED Pro hjertestarteren ved at åbne låsen på fronten og løfte dækslet.
- 3) Hold **Tænd/Sluk knappen** på hjertestarteren nede i 7-8 sekunder.
- 4) Tryk på den venstre Softkey med mærket **USB**.
- 5) Tryk på den venstre Softkey med mærket **NY**.
- 6) **Sæt USB stikket i USB porten** til højre for batteriet. (Det kan være nødvendigt at fjerne gummidækslet først.)
- 7) Hjertestarteren genkender USB stikket og udlæser data derfra. Når overførselen er overstået, giver hjertestarteren besked om dette: **Fjern USB-stik fra hjertestarteren og indsæt den i PC.**
- 8) I programmet RescueNet Code Review klikkes på knappen **Upload Case From USB**. Vælg det drev som repræsenterer dit USB stik og **klik OK**.
- 9) I programmet **RescueNet Code Review** vises en dialogboks overførselsprocessen.
- 10) Ønskes **data printet**, tryk på følgende: File - Print - Case - Stripes - OK