

Sådan bruges hjertestarteren

ZOLL AED Plus hjertestarteren er enkel at bruge, og guider førstehjælperen sikkert igennem hele forløbet.


1 Kontrollér bevidsthed

Kontrollér bevidsthed og vejtrækning. Ring 112.



2 Start HLR

Hjertelungeredning påbegyndes mens hjertestarteren hentes.

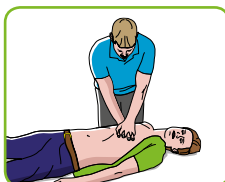


3 Tænd hjertestarteren

Følg hjertestarterens instruktioner.




4 Anbring elektrode

Fjern tøj og anbring elektroden som anvist.

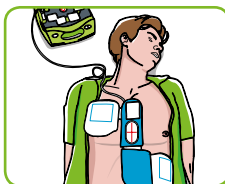


5 Stød

Hvis stød anbefales, tryk på den blinkende stød-knap. Rør ikke patienten.

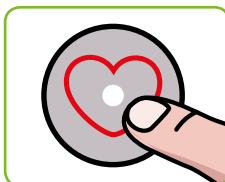

6 Følg instruktionen

Giv hjertelungeredning. Forsæt indtil ambulancen ankommer.

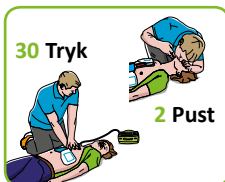

ZOLL®

ZOLL Medical Corporation er en af verdens førende producenter af defibrillatorer (hjertestartere). Virksomhedens rødder går mere end 50 år tilbage, hvor Professor Paul Zoll på Harvard Medical School foretog de første kliniske forsøg med ekstern defibrillering på mennesker.

ZOLL udvikler i dag løsninger, der øger overlevelsen ved hjertestop.

ZOLLs unikke produkter har gjort dem til en af USAs hurtigst voksende virksomheder. Blandt kunderne i Danmark er en lang række førende hospitaler samt private- og offentlige virksomheder.

Red liv med hjertestarter



Gør en forskel og red liv

Hver anden time falder en dansker om med pludseligt hjertestop. Hurtig og rigtig førstehjælp indenfor få minutter er afgørende. Chancen for at overleve falder med 10% for hvert minut, der går uden førstehjælp. Hjertelungeredning (HLR) er vigtig førstehjælp, men den mest effektive behandling af hjertestop opnås, når god hjertemassage kombineres med brug af en hjertestarter.

I Danmark overlever kun ca. 12% (2013) et pludseligt hjertestop. Internationale undersøgelser viser, at hurtig indsats med hjertestarter kan øge overlevelsen til mere end 50%.

ZOLL AED Plus, er den eneste hjertestarter med indbygget REAL CPR Help®, som måler og registrerer hvordan du giver hjertemassage - og som giver dig feedback, der hjælper dig med at gøre det rigtigt. Meddelelser via lyd og billeder hjælper dig til at yde livreddende førstehjælp med selvtillid og overblik.

Sundhedsstyrelsen

ZOLL AED Plus hjertestarter efterlever alle Sundhedsstyrelsens krav og specifikationer til en hjertestarter.

Under en løbetur blev Morten Berthelsen ramt af hjertestop. Hjertelungeredning samt stød fra hjertestarteren ZOLL AED Plus, reddede Mortens liv.



Det kan ske for enhver

Hjertestop rammer mennesker i alle aldersgrupper, men risikoen stiger med alderen. I omkring halvdelen af alle tilfælde slår hjertestoppet ned som lyn fra en klar himmel.

27-årig Morten reddet af AED Plus hjertestarter

Den 9. juli 2012 er en dag, Morten Berthelsen aldrig glemmer. Morten var på ferie med sin familie på Bornholm, da han under en løbetur fik uventet hjertestop. Folk i nærheden startede umiddelbart HLR, mens to tyske turister hentede den nærmeste hjertestarter i det lokale supermarked. Med effektiv hjertemassage, indblæsninger og stød fra en hjertestarter fik de gang i Mortens hjerte igen.

Det er næsten helt sikkert at uden HLR og stød fra hjertestarteren, havde Morten ikke levet i dag.

Se hele Mortens historie på www.zollaed.dk.



ZOLL AED PLUS®

En elektrode er nemmere end to

ZOLLs patenterede elektrode CPR-D•padz™ er to elektroder samlet i ét stykke, der hurtigt og nemt placeres på patienten.

Unikt feedback system ved hjertemassage

ZOLLs patenterede elektroder måler hjertemassagens hastighed og dybde. En stemme i hjertestarteren fortæller dig, om du giver effektiv hjertemassage.

Grafisk og brugervenligt design

Lyd, tekst og grafiske illustrationer guider dig sikkert igennem den livreddende førstehjælp.

Mindre vedligehold og lave driftsomkostninger

Vedligehold er begrænset til nye elektroder og batterier hvert femte år. Dette gør det nemt og billigt at vedligeholde hjertestarteren.

Automatisk selv-test og 7 års garanti

Automatisk selv-test sikrer dig, at hjertestarteren altid er klar til brug. Der er 7 års garanti på hjertestarteren.

ZOLL AED Plus er robust, brugervenlig og er en af de mest fortrukne hjertestartere på markedet

Læs mere om ZOLL AED Plus på www.zollaed.dk.